

BD
c/o 101 Mary Street W. Suite 300
Whitby, Ontario, L1N 2R4
Product Notification Group
1-866-556-8123



Janvier 2006

URGENT: CORRECTION DE DISPOSITIF MÉDICAL **Indicateurs de glycémie BD Logic^{MD}, BD Latitude^{MC}, The Link^{MD}**

Cher consommateur apprécié,

Nos données indiquent que vous pourriez utiliser un indicateur de glycémie BD Logic^{MD}, BD Latitude^{MC} ou The Link^{MD}. Afin que vous puissiez continuer d'obtenir des résultats de glycémie précis, nous vous demandons de prendre connaissance des importants renseignements suivants. Si vous n'utilisez plus ces indicateurs, veuillez ne pas tenir compte de cette lettre.

Au Canada, les indicateurs identifiés ci-dessus sont programmés pour afficher les résultats en « mmol/L » et ne peuvent être modifiés par l'utilisateur. En de très rares occasions, ces indicateurs peuvent changer l'affichage de l'unité de mesure, passant de « mmol/L » à « mg/dL ». Ceci peut se produire lors du changement de piles ou si l'indicateur subit un impact.

Si votre indicateur affiche les résultats en « mg/dL » vous pourriez mal interpréter vos résultats. Cette interprétation erronée pourrait entraîner une mauvaise prise en charge de votre régime alimentaire ou de vos médicaments provoquant des périodes temporaires d'hypoglycémie.

Vous pouvez continuer d'employer votre indicateur pour surveiller votre glycémie. **À chaque fois que vous procédez à un test, vous devez vérifier que les résultats sont bien affichés en « mmol/L »** (voir l'encart ci-joint). Si votre indicateur affiche les résultats en « mg/dL », n'utilisez pas les résultats fournis et communiquez avec BD pour obtenir de l'aide au 1-866-556-8123 (sauf en cas d'urgence ou pour usage médical), sans frais, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Si votre indicateur affiche correctement des résultats en « mmol/L », il n'y a pas lieu de communiquer avec BD et vous pouvez continuer d'employer votre appareil.

Pour une référence éclair, consultez l'encart ci-joint : « Vérifiez à chaque prélèvement ».

Nous nous excusons de tout inconfort qui pourrait résulter de cette situation et nous vous remercions de votre fidélité envers les produits BD. Pour toute question, veuillez communiquer avec BD au 1-866-556-8123 (sauf en cas d'urgence ou pour un usage médical).

Troy Hopps

Troy Hopps
Directeur
BD Médical - Soins du diabète

Vérifiez à chaque prélèvement

1. Conformez-vous aux directives du Manuel pour procéder à votre test de glycémie.
2. Vérifiez que votre résultat est bien affiché en **mmo/L**. Si votre résultat est affiché en **mg/dL**, ignorez-le et communiquez avec BD au 1-866-556-8123 (sauf en cas d'urgence ou pour avis médical), sans frais, 24 h sur 24, 7 jours sur 7.



Correct



Incorrect

BD, le logotype de BD, BD Logic, BD Latitude et The Link sont des marques de commerce de Becton, Dickinson and Company. ©2006 BD.

Becton, Dickinson and Company